

①体温計の電源を入れる。



②体温計のセンサーを、耳裏の表面から1cm程度離れた位置に当て、電源ボタンを押しながら測定してください。

検温中はピッピッピッピッピッと5回音が鳴ります。最後にピロッと音が鳴ったら検温終了です。電源ボタンから指を離してください。



- 計測箇所に髪の毛がかからないように注意してください。
- 検温終了（最後の音が鳴り終わる）まで計測箇所から離さないでください。
- 体温計は耳裏に垂直に当ててください。

ただしく検温するために・・・

- ・ 検温の妨げにならないよう、髪の毛やメガネは取り除いてください。
- ・ 汗をかいている場合はふき取り、発汗していない部分で測定してください。
- ・ 体が冷暖房や直射日光の影響を受けないようにしてください。
- ・ 外気が熱い、または寒い場合は正しく検温できない場合があります。検温は気温15℃以上の屋内で、安静にさせて落ち着いてから行ってください。
- ・ 体温計は冷暖房や家電製品の排熱、熱伝導率の高い鉄製の家具などを避けて気温15～40℃の場所で保管してください。